



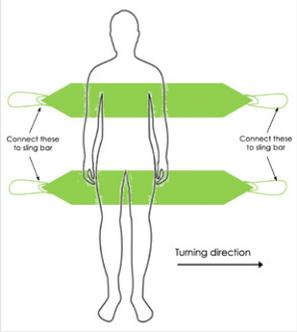
Hillrom™



TRANSFERENCIAS SEGURAS Y MOVIMIENTO™ PROGRAMA



Decubito Prono con Multistrap™ Lift Aid

OPCIONES DE EQUIPAMIENTO	PROCEDIMIENTO	COMENTARIO DE LA INSTALACIÓN
<p>ELEVADOR DE TECHO O ELEVADOR DE PISO 2 MULTISTRAP™ – de preferencia wide</p> <p>Elevador de techo: Mínimo de 3 profesionales del equipo de cuidado.</p> <p>Elevador de piso: Mínimo de 4 profesionales del equipo de cuidado.</p> <p>Considera el tamaño, peso, morfología y el estado crítico del paciente.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Revisa el protocolo de tu institución incluyendo las indicaciones y las listas de chequeo aplicables. ▪ Explícale el procedimiento al paciente (si es apropiado). ▪ Ajusta la altura de la cama a una altura adecuada para trabajar. ▪ Baja las barandillas y remueve la cabecera si es posible. ▪ Planifica en qué dirección girará el paciente. Ajusta el equipamiento, las vías, latiguillos y drenajes, para que haya suficiente espacio durante el movimiento. ▪ Desliza el MultiStrap debajo del paciente para que la parte de arriba de la correa superior quede debajo de la axila y la parte superior del strap inferior quede cerca del trocánter mayor. ▪ Alínea la percha o Barra paralela al paciente (pies a cabeza) ▪ Coloque las extremidades para prepararse para girar. ▪ Coloca los bucles más cortos del MultiStrap del lado contrario al cual el paciente va a girar y los bucles más largos del lado al cual el paciente va a voltearse. ▪ Verifica que los straps estén bien sujetadas a la percha o barra y comienza a subir la percha. Según va subiendo, el paciente comenzará a girar hacia su costado. ▪ Levanta al paciente lo suficiente para que sea fácil de girar, pero no lo levantes completamente de la superficie. Desliza el paciente al lado de la cama lejos de la dirección del giro para crear espacio en la superficie. ▪ Coloca almohadas adicionales, apoyos para el paciente, bloques de espuma u otros dispositivos de posicionamiento en la superficie. ▪ Comprueba las líneas, vías respiratorias y tubos mientras el paciente rueda hacia su posición. ▪ Continúa hasta que la posición de decúbito prono se logre asegurándote de que las almohadas, los apoyos para el paciente, los bloques de espuma y otros dispositivos están apropiadamente ubicados a medida que el paciente gira en la superficie. ▪ Ajusta la posición del paciente según sea necesario. ▪ Remueve los MultiStraps <p>Invierte los pasos para regresar a la posición supina original.</p>	<p>Ubicación del almacén, inventario de las correas, etc.</p>

Para preguntas, contacta a tu representante de Hillrom.

hillrom.com

Hillrom se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía que hace Hillrom es la garantía expresa por escrito extendida en la venta o alquiler de sus productos.